

VBM QUICKTRACH II ballonnal

Sürgősségi cricothyreotómiás eszköz, amely a felső légút elzáródása esetén lehetővé teszi a gyors és biztonságos légútbiztosítást

- A vékony falú ballon lezárja a légcsövet, ezáltal megfelelő hatásfokú lélegeztetést biztosít, miközben véd az aspiráció ellen.
- A fék és a biztonsági rugó csökkenti a légcső hátsó falán történő sérülés kockázatát.
- Az anatómiai kialakítású kanül az „emlékező műanyag” effektus révén jól alkalmazkodik a légcső alakjához.
- A egyedi steril csomagolásban lévő, felhasználásra készen összeszerel eszköz nagyon gyors beavatkozást tesz lehetővé.



QUICKTRACH II ballonnal

komplett készlet
egyedi steril csomagolásban

Katalógusszám
30-10-004-1

csomagolás
1



A QUICKTRACH II jellemzői




Lekötő nyakpánt

- Puha szivacsos, tépőzáras lekötőszalag
- Biztonságos rögzítést tesz lehetővé.



Ballon

- Megfelelő hatásfokú lélegeztetést biztosít, miközben véd az aspiráció ellen.
- Ultravékony, nagy szilárdságú anyagból készül.

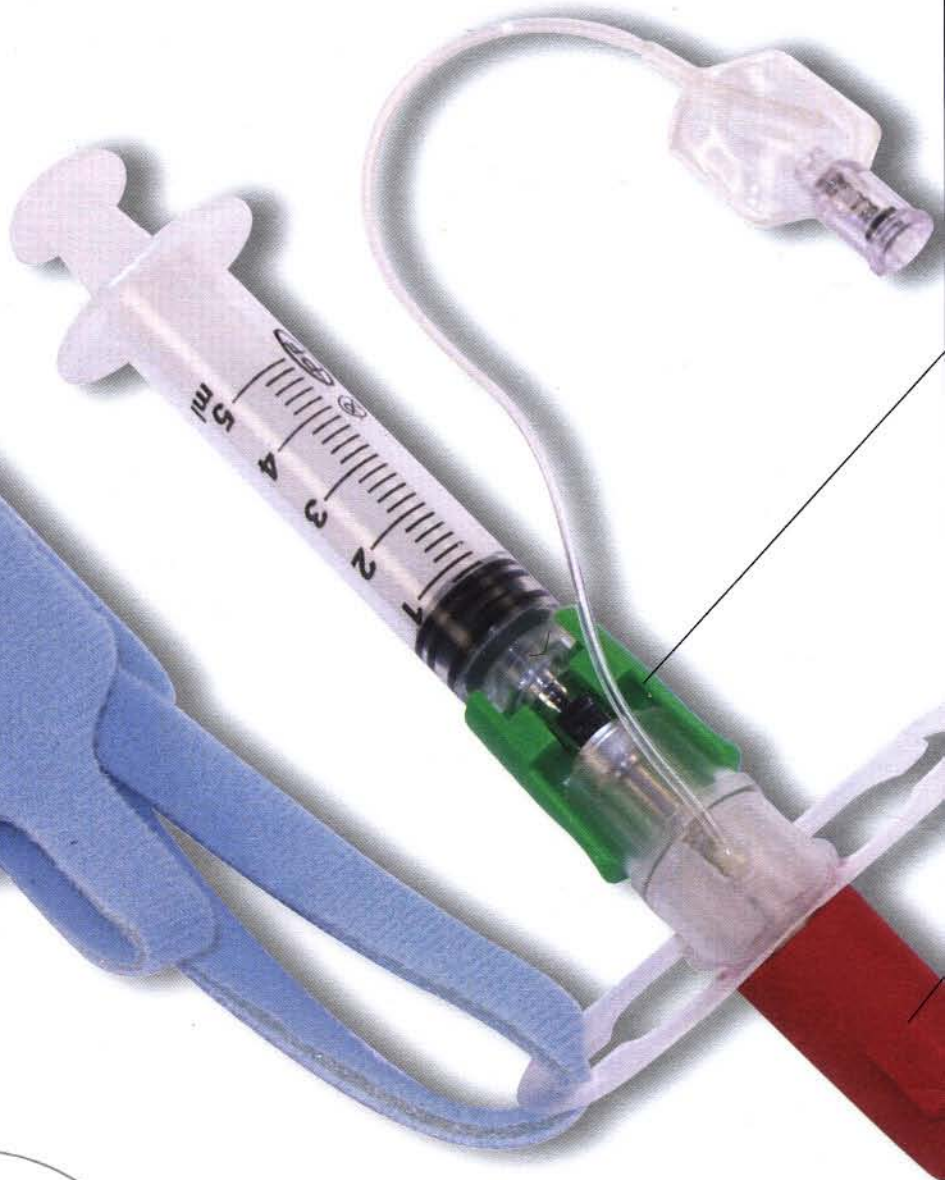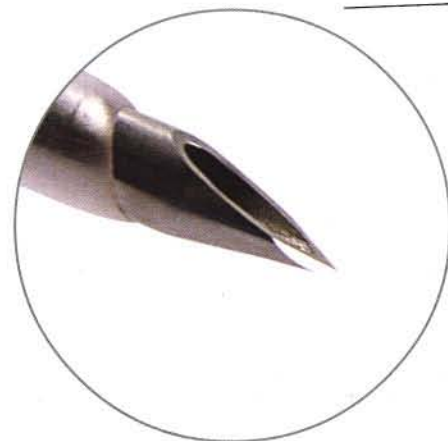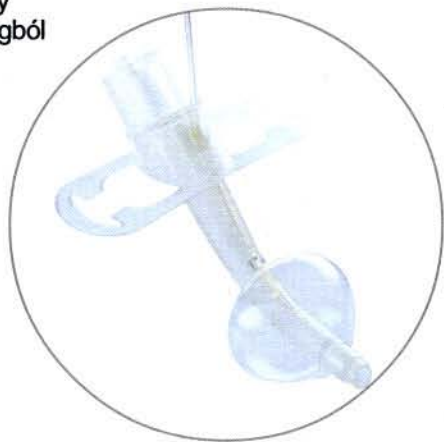

Biztonsági műanyag rugó

- A beszúrás után, amikor a műanyag kanült letoljuk a tűről, a zöld biztonsági rugó bepattan a kanül 15mm-es csatlakozójának pereme fölé. ①

- A tű vége most már nem bújik ki a műanyag kanülből, így nem tudja megsérteni a légcső falát. ②

- A biztonsági rugó a továbbiakban már nem engedi meg, hogy a tű végét véletlenül kitoljuk a kanülből. ②

„Emlékező műanyag” effektus

- A fémtű teljes visszahúzása után a műanyag kanül visszanyeri eredeti, preformált, az anatómiai viszonyokhoz kialakított alakját. ③

Műanyag fék

- Megakadályozza, hogy a beszúrás utáni hirtelen mechanikai ellenálláscsökkenés miatt a tű véletlenül a légcső hátsó falát megsértse.

Fém tű


- Speciális, hármasszögű tűél kónuszos kiképzéssel, amely csak 2 mm-es bevágást hoz létre és feltágul 4 mm-re.
- Nincs szükség külön szikével történő bemetszésre.

Csomagolás

- A QUICKTRAC II használatra kész, összeszerelt állapotban kerül csomagolásra.
- Feltéphető, kemény műanyagtálcás, egyedi steril csomagolás




A QUICKTRACH II használata

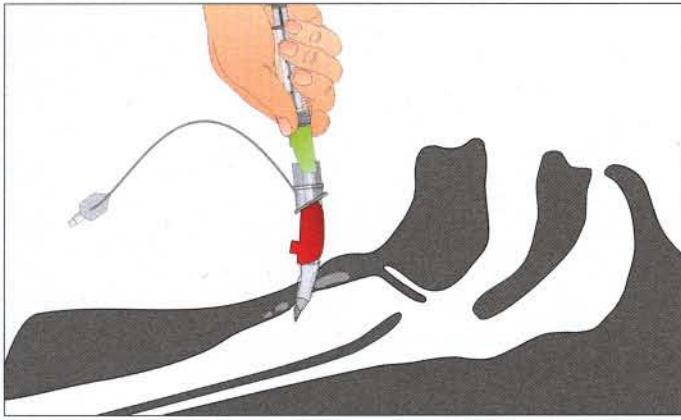

Készítjük elő a beteget úgy, hogy nyakát teljesen kifeszítjük a fej hátrahajtásával. Ha szükséges, helyezünk egy ruhadarabot a nyak alá. Mutatóujjunkkal haladjunk lefelé a nyakon, keressük meg a cricothyreoidalis membránt úgy, hogy először az ádámcsutkát lokalizáljuk. Vezessük ujjunkat a pajzsporc mély pontjára közvetlenül a gyűrűporc elé. Ez a korrekt hely a katéter bevezetésére.


Tartsuk az eszközt erősen és merőlegesen szúrjuk be a gégebe.

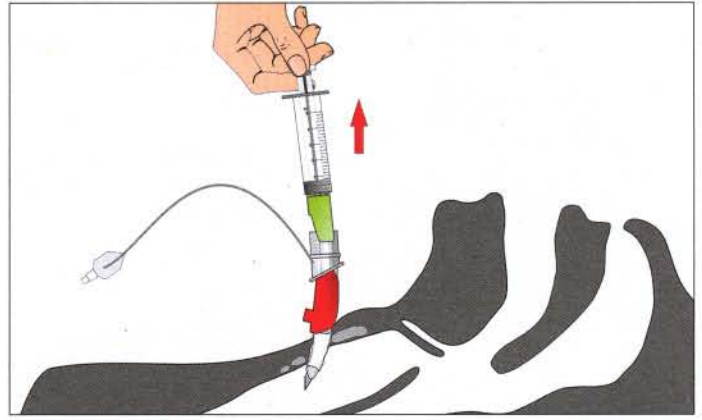

A tű éles csúcsa és kónuszos kiképzése miatt nincs szükség a bőrön szikével előzetesen bemetszést készíteni. A gégen képződő nyílás nagyobb mértékben a bőr tágulása révén jön létre, mintsem a szövetek elmetészésével. Ez csökkenti a vérzés veszélyét és csak az éppen szükséges méretű nyílás jön létre.


A tű beszúrása után toljuk a kanült előre, ameddig a biztonsági távtartó megengedi.

Ezután szívjuk meg a fecskendőt. Mikor behatolunk a légcsőbe, a fecskendőbe levegő kezd áramlani.

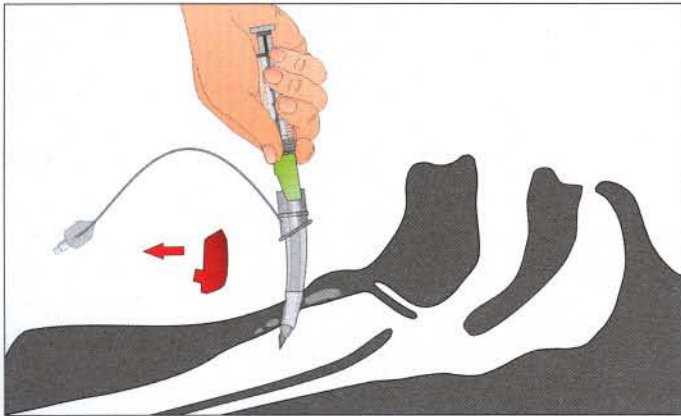


Vegyük le a biztonsági távtartót (féket). Ez a kis műanyag fék megakadályozza, hogy a tűt véletlenül (a beszúrás utáni hirtelen ellenálláscsökkenés következtében) a légcső túlsó faláig toljuk és ezáltal sérülést okozzunk rajta.


A fék eltávolítás után tartsuk erősen a fecskendőt, hogy a kanül megtartsa helyzetét.

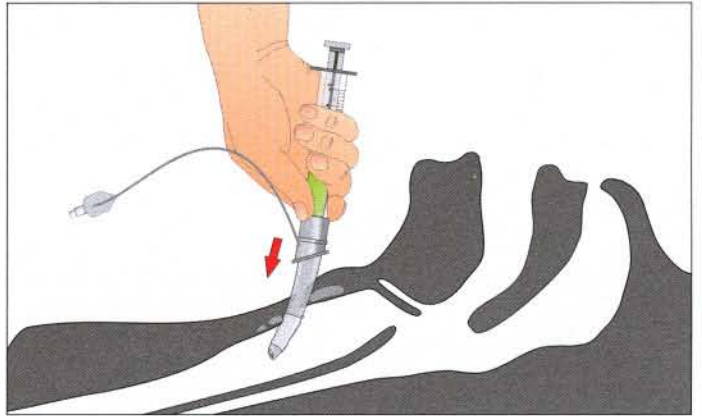

Toljuk tovább, de most már csak a műanyag kanült hüvelykujjunkkal, ameddig meghalljuk a biztonsági műanyagrugó bekatatásának hangját. Ez azt jelzi, hogy a fém tű már nem nyúlik ki a kanülből, így az nem tud véletlen sérülést okozni. Toljuk tovább a QUICKTRACH II kanült ameddig a rögzítőszárnyak ráfekszenek a nyakra. Húzzuk ki a tűt.

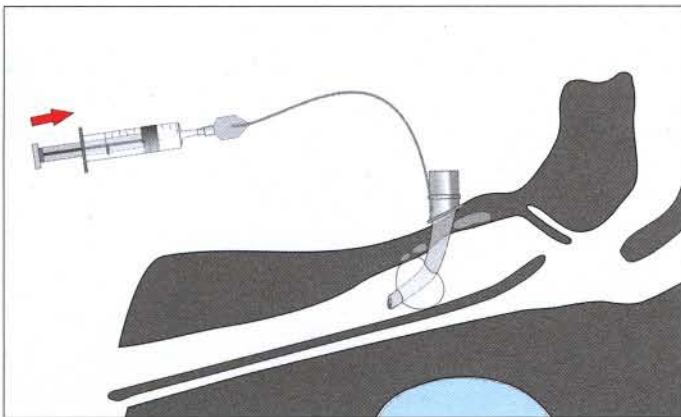

Fújuk fel a ballont a QUICKTRACH II-n lévő 10 ml-es fecskendővel.

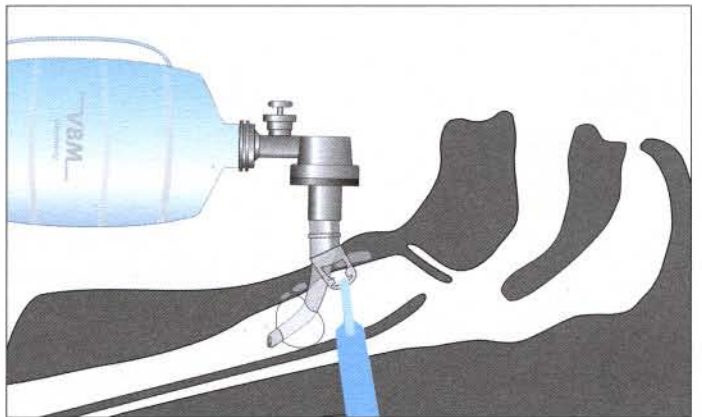

Rögzítsük a műanyag kanült a nyakpánttal. Lélegeztessük a beteget úgy, hogy a kanül 15 mm-es csatlakozóját összekötjük a kézi lélegeztetővel vagy lélegeztető géppel.

VBM

Pásztor ADA-MED Kft. * 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.

T: 397-0109, 376-9576; Fax: 376-9576

E-mail: adamed@adamed.hu; WEB: www.adamed.hu



CE
0123

