


VBM POCKET tubusvezető

A POCKET tubusvezető az endotracheális intubációt segítő eszköz szájon át történő laringoszkópos vagy videolaringoszkópos feltárás során

- A legkisebb összehajtott tubusvezető. Összehajtván 20 cm, kiegyenesítve 65 cm, a három csuklónál összepattintva másodpercek alatt használatra kész.
- Ideális sürgősségi táskában, gépkocsiban, helikopteren, könnyen elér az orvosi köpeny zsebében, sürgősségi kosárban, stb.
- ≥ 6 mm méretű ET tubusokhoz
- Egyszer használatos, steril
- 10, 20, 30 és 40 cm-nél hosszúságjel

JELLEMZŐI

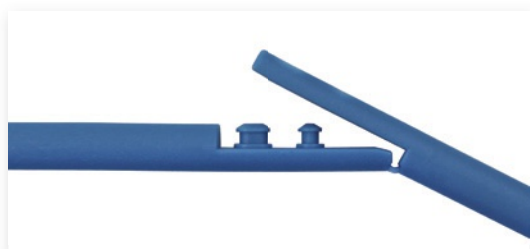

Csuklók

Hajtogassuk szét 65 cm hosszúságúra és pattintsuk össze a három csuklónál. Másodpercek alatt használatra kész.



Rögzítés a csuklóknál

Az összepattintott részek bonthatatlan kötést biztosítanak.




Csúcs

Az előre formált, lekerekített csúcs atraumatikus bevezetést tesz lehetővé, nem sérti a légcső nyálkahártyáját.




L eredeti.méretű.kép., 1:1

HASZNÁLAT

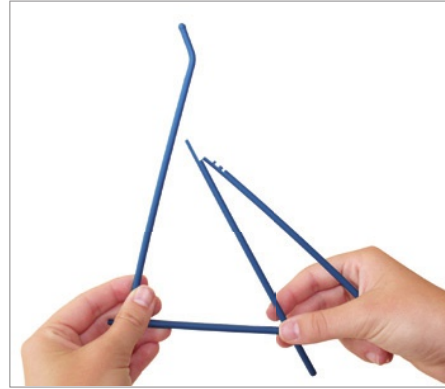

Hajtogassuk szét a tubusvezetőt

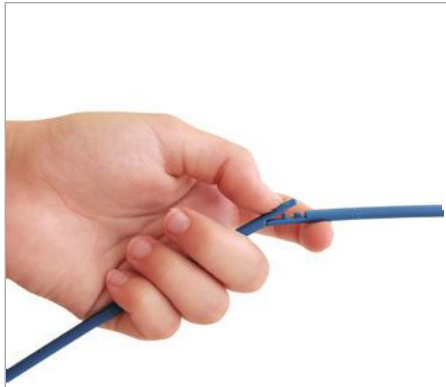

Szorosán pattintunk össze a tubusvezető két felét a csuklóknál



Ha szükséges, hajlítsuk meg a végét



A tubusvezetőt helyezzük be a légcsőbe



Húzzuk rá az endotracheális tubust a tubusvezetőre és rajta keresztül csúsztassuk be a tubust a légcsőbe

Rendelési információk

POCKET tubusvezető
steril csomagolásban

Méret	Hossz	ET tubus méret	Kat.szám	Csomagolás
15 CH	65 cm	≥ 6,0 mm	33-80-650-1	5

Steril, merev műanyagdobozban

Méret	Hossz	ET tubus méret	Kat.szám	CSE
15 CH	65 cm	≥ 6,0 mm	33-81-650-1	1

Pásztor ADA-MED Kft.

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.

T/Fax: 376-9576, 397-0109

Email: adamed@adamed.hu

Web: www.adamed.hu - www.laringealis-tubus.hu



VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a.N. | Germany

Tel.: +49 7454 / 95 96 10 | Fax: +49 7454 / 95 96 33 | e-mail: info@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

